

# alins®

Gotas oftálmicas para el tratamiento del edema corneal

## INSTRUCCIONES DE USO

### INDICACIÓN

Alins® es una solución oftálmica salina, estéril, hipertónica y sin conservantes, que se presenta en envase multidosis.

Alins® se utiliza para el tratamiento del edema corneal. Gracias a sus propiedades físico-osmóticas elimina el exceso de líquido, mejorando así la visión.

Alins® se aplica especialmente después de cirugías oculares (p.ej. operación de cataratas) y después de exámenes diagnósticos (p.ej. gonioscopia), si existe una disfunción en el balance osmótico del tejido de la córnea.

### MODO DE USO

Para abrir el envase, retire el anillo de seguridad tirando de la solapa hasta extraerlo por completo (1). Retire el tapón tirando hacia arriba (2). Inclíne la cabeza ligeramente hacia atrás y tire suavemente del párpado inferior hacia abajo mirando hacia arriba. Mantenga el envase con el gotero hacia abajo e instile una gota en el saco conjuntival del ojo de 3 a 5 veces al día (3 y 4). Cierre los ojos lentamente para que el líquido se distribuya de forma homogénea sobre la superficie del ojo.

Evite el contacto de la punta del gotero con el ojo o las manos. Elimine la gota sobrante del gotero golpeando suavemente la base del envase. Cierre el envase presionando ligeramente el tapón (5).

Consulte con su oftalmólogo la dosis y el periodo de aplicación.



El especial sistema de filtro estéril del gotero requiere unos segundos de espera sin presionar el envase después de cada aplicación para permitir la entrada de aire nuevamente en el envase. Sin este periodo de espera, se imposibilita una nueva aplicación. Debido a esta razón física, a medida que se vacía el envase, es necesario aplicar mayor presión.

### COMPOSICIÓN

Cloruro de sodio 5% y agua para inyecciones.

### PRESENTACIÓN

10 ml

Art.-Nr. 22.0570.04

# alins®

Gotas oftálmicas para el tratamiento del edema corneal

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No utilice este producto sin recomendación médica.
- No utilice este producto si el anillo de seguridad del tapón está roto o el envase está dañado.
- Evite el contacto de la punta del gotero con el ojo.
- En general, en este tipo de enfermedades de la córnea, se suele evitar el uso de lentes de contacto. Si utiliza lentes de contacto, debe retirarlas antes de la aplicación del producto. Se recomienda esperar unos 15 minutos antes de ponerse las lentes de nuevo.
- En el caso de aplicar otros tratamientos oftálmicos simultáneamente con Alins®, consulte con su oftalmólogo. Debe haber un intervalo como mínimo de 5 minutos entre aplicaciones.
- Es posible experimentar sensación de ardor y/o irritación en el ojo afectado.
- No utilice las gotas oftálmicas tras la fecha de caducidad que se encuentra en el envase multidosis y en la caja.
- Puede aplicarse hasta 12 meses después de su apertura.
- Debido al innovador sistema de filtro estéril del gotero, siempre queda un pequeño resto de producto en el envase.

## CONSERVACIÓN

Conservar entre 2°C–25°C. No congelar. Cerrar el envase con el tapón después de cada uso. Proteger el envase de la luz guardándolo en la caja.

LOT



El número de lote y la fecha de caducidad están impresos en el envase y en la caja.

STERILE A

Esterilizado utilizando técnicas de procesamiento asépticas.



Consultar las Instrucciones de uso.



Temperatura de conservación.



No utilice este producto si el anillo de seguridad del tapón está roto o el envase está dañado.

### Penta Arzneimittel GmbH

Werksstrasse 3 - 92551 Stulln (Alemania)

Distribuidor en España:

**BRILL PHARMA, S.L.**

C/ Munner, 8 - 08022 Barcelona (España)

 <sub>0483</sub>  
Producto Sanitario

Fecha de la información: 04/2018